

# Gastric-Transit

- röntgendichte Marker



## Gastric-Transit das Diagnostikum zur Feststellung der Magenentleerungszeit.

Der Test besteht aus einer Cellulosekapsel, welche zu einer Mahlzeit eingenommen wird. Die Kapsel enthält 10 kleine, auf dem Röntgenbild sichtbare Marker, die sich im Verdauungsapparat nicht verändern.



Mit einem einzigen Röntgenbild, kann die Magenaktivität mit Hilfe von Gastric Transit rekonstruiert werden. Die Anzahl von Markern, welche sich nach Ablauf von 6 Stunden noch im Magen befinden, wird gezählt.

Gemäß etablierten Normalwerten sollten alle Markierungen nach 6 Stunden den Magen verlassen haben. Falls nach 6 Stunden immer noch Marker im Magen festgestellt werden, deutet dies auf eine verzögerte Magenentleerung hin.



- Nach 8-10 Stunden Nüchternzeit erhält der Patient zur Standard-Testmahlzeit eine Kapsel mit Markern
- Die Cellulosekapsel löst sich im Magen vollständig auf und Marker werden freigegeben
- Durch Marker festgestellte Magenentleerungszeiten beziehen sich auf unverdauliche Mageninhalte
- Nach 6 Stunden sollten alle Marker den Magen verlassen haben und es wird eine Röntgenaufnahme des Oberbauches in liegender Position gemacht

Artikelnummer: 209905


Markerzusammensetzung aus 30% Bariumsulfat

Einschätzung der Wirksamkeit von Prokinetika.  
Beurteilung der motorischen Funktion des Magens bei Patienten mit nicht-ulceraler Dyspepsie oder bei vermuteter diabetischer Gastroparese.

Klinische Anwendung

Besuchen Sie unsere Internetseite unter:

[www.gi-produkte.de](http://www.gi-produkte.de)

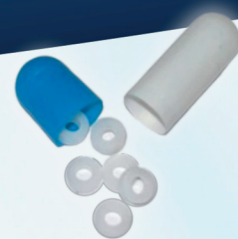

## Rückfax an 05221 12253-99

\_\_\_\_\_  
Firma/Klinik/Praxis

\_\_\_\_\_  
Ansprechpartner

\_\_\_\_\_  
Abteilung

\_\_\_\_\_  
Straße, Nr.

\_\_\_\_\_  
PLZ Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
E-Mail

Bitte senden Sie mir:

- Angebot zum Gastric Transit
- Muster zu Testzwecken
- den aktuellen Produktkatalog zu